



Einfach mal raus.

Mit dem tragbaren Sauerstoffkonzentrator SimplyGo von Philips Respironics können Sie machen, was immer Sie wollen.

PHILIPS
RESPIRONICS

SimplyGo, die Freiheit, die Sie brauchen!

Ein kleiner Einkaufsbummel, ein Museumsbesuch, ein schönes Wochenende, oder ein wohl verdienter Urlaub – mit SimplyGo können Sie trotz Sauerstofftherapie all das genießen. Leicht, aber dennoch robust, ist SimplyGo in einer praktischen Tragetasche und auf einem Trolley mit leicht laufenden Rollen jederzeit für einen Spaziergang bereit. In der Zubehörtasche findet Ihr Zubehör für jeden Anlass Platz.



SimplyGo ist der erste Sauerstoffkonzentrator von Philips, der Ihnen alle Vorteile eines Dauerflow-Gerätes bietet. Er ist nur 4,5 Kilogramm schwer und lässt sich so leicht überall mit hinnehmen. Damit ermöglicht SimplyGo Ihnen die Flexibilität, unterwegs zu sein, sei es tagsüber für die Arbeit, für ein Wochenende oder für einen langen Urlaub.

Für Ihre Bedürfnisse stehen Ihnen drei verschiedene Modi zur Verfügung:

Pulsmodus

SimplyGo erkennt das Einatmen und führt das nötige Sauerstoffvolumen zu.

Dauerflow

Kontinuierliche Sauerstoffzufuhr von 0,5 bis 2 l/min.

Schlafmodus

Der Schlafmodus hat eine erhöhte Triggerempfindlichkeit für den Einsatz während der Nacht beim Schlafen. SimplyGo wechselt automatisch zu 2 l/min Dauerflow, wenn keine Einatmung erkannt wird.

Sauerstoff, immer da verfügbar, wo Sie ihn brauchen.

Für die Sauerstofftherapie zu Hause können Sie den stationären Konzentrator **EverFlo** einsetzen. Er wird ideal ergänzt durch den tragbaren **SimplyGo**.

Da **SimplyGo** und **EverFlo** eine **Technologie** einsetzen, die aus der Umgebungsluft den benötigten Sauerstoff filtern, sind Sie nicht auf regelmäßige Sauerstofflieferungen angewiesen. Erleben Sie so eine größere Unabhängigkeit und eine bessere Lebensqualität.*



*Tragbarer Sauerstoff verlängert die tägliche Sauerstofftherapiedauer für Patienten mit COPD und verbessert die Lebensqualität von Patienten mit guter Compliance. Vergeret et al. Eur Respir J 1989;2: 20-25

SimplyGo – Einfach in Zuverlässigkeit und Wartung!

Als COPD-Patient (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) sind Sie täglich für viele Stunden* auf Ihre Sauerstofftherapiegeräte angewiesen. **SimplyGo** bietet dank seines robusten Designs, das den Stößen und Schlägen des täglichen Lebens widersteht, zugleich eine effektive Therapie und die gewünschte Unabhängigkeit und Freiheit.



Zuverlässigkeit auf Schritt und Tritt

SimplyGo strebt einen neuen Standard bei der Zuverlässigkeit von tragbaren Konzentratoren an. **SimplyGo** wurde entwickelt, konstruiert und sorgfältig getestet, damit er Ihnen im täglichen Leben jederzeit und überall folgen kann und den Belastungen stand hält.

In der Entwicklung wurde **SimplyGo** extremen Bedingungen einschließlich Herunterfallen, Erschütterungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt, um die sichere Leistung im Alltagsgebrauch zu überprüfen.

Mit einer Kompressorlebensdauer von 15.000 Stunden gewährleistet der **SimplyGo** einen zuverlässigen Betrieb.

Wartung einfach gemacht!

SimplyGo macht es Ihnen und Ihrem medizinischen Betreuer einfach, weil praktisch keine vorsorgliche Wartung erforderlich ist.

SimplyGo ist flexibel:

- Es gibt keine Filter oder Teile, die regelmäßig von Ihnen oder Ihrem medizinischen Betreuer ausgetauscht werden müssen.
- Im Falle eines Defekts kann Ihr medizintechnischer Betreuer den **SimplyGo** mit ein paar einfachen Handgriffen selbst reparieren und muss das System dafür nicht einschicken.

Hinweise

*Klinische Richtlinien empfehlen, dass COPD-Patienten für ihr langfristiges Überleben und ihre Lebensqualität die Sauerstofftherapie täglich mindestens 15 Stunden lang anwenden sollten. Deshalb benötigen diese Patienten Sauerstoff sowohl zu Hause (stationäre Sauerstofftherapie) als auch außerhalb (ambulante Sauerstofftherapie).

SimplyGo auf einen Blick

Wahl des Modus

Touchpad-Bedienoberfläche

Leicht – 4,5 kg
Das einzige leichtgewichtige Gerät, das sowohl getriggerten als auch Dauerflow für die Sauerstoffzufuhr bietet.
Einfach zu tragen – überall und jederzeit!

Einfach zu wechselnder Akku
Weitere Informationen zu Akkulaufzeiten finden Sie in den Produktspezifikationen.

Die Flugbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat die Zulassung für die Nutzung des SimplyGo während des Fluges erteilt.¹



SimplyGo Zubehör

Alles, was Sie benötigen in nur einer SimplyGo-Zubehörtasche

Stabiler SimplyGo-Trolley mit großen Rädern für leichtes Ziehen

Externes Ladegerät für Akku

Luftbefeuchtertasche (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gleichstromadapter

Wechselstromadapter

Netz Kabel für Nutzung im Flugzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

¹Trotz der Zulassung der FAA für portable (nicht im Lieferumfang enthalten) während eines Fluges, kann es sein, dass einige Fluggesellschaften zusätzliche Anforderungen stellen, z.B. vorheriges Anmelden der Reise oder das Mitführen einer Bescheinigung Ihres Arztes über die Notwendigkeit der Sauerstofftherapie.

Spezifikationen

Produktspezifikationen	
Sauerstoffkonzentration	87 bis 96 % bei allen Einstellungen
Flow-Einstellungen	
Pro Impuls einstellbare Dosis	1 = 12 ml 4 = 48 ml 2 = 24 ml 5 = 60 ml 3 = 36 ml 6 = 72 ml
Dauerflow	0,5 l/min – 1 l/min – 1,5 l/min – 2 l/min
Schlafmodus	Variable Pulsvolumina basierend auf der Atemfrequenz, um je nach Einstellung ein konstantes Minutenvolumen beizubehalten: 1 = 250 ml/min 2 = 500 ml/min 3 = 750 ml/min 4 = 1000 ml/min 5 = 1250 ml/min 6 = 1500 ml/min
Geräuschpegel	43dB (nominal) im Pulsmodus, Stufe 2
Alarmfunktionen	Niedrige Sauerstoffkonzentration (<83%) keine Atmung erkannt hohe Atemfrequenz kein Flow niedrige Akkuleistung Akku entladen technischer Systemfehler
Abmessungen	29,2 cm x 25,4 cm x 15,2 cm
Gewicht	4,5 kg mit eingesetztem Akku
Stromverbrauch	150 W während des Aufladens 120 W während des Normalbetriebs
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 95 %
Einsatzhöhe	bis 3048 m über NN
Akkulaufzeiten*	
Pulsmodus, Stufe 2:	ca. 3 Stunden
Dauerflow, 2 l/min:	ca. 54 Minuten
Ladezeit 2-3 Stunden pro Akku bei vollständiger Entladung	

*Basierend auf 20 Atemzügen pro Minute

Bestellinformationen

SimplyGo-System	Artikelnummer
Bestandteile: SimplyGo, Tragetasche, Trolley, ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, jeweils ein Netzkabel für Gleich- und Wechselstrom, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung	1069058
Zubehör	Artikelnummer
Trolley	1074885
Tragetasche	1082663
Lithium-Ionen-Akku	1082662
Netzkabel für Europa	1082665
Ladegerät für externen Akku (Netzstecker für Europa)	900-118
Zubehörtasche	1083696
Wechselstromadapter	1082661
Gleichstromladegerät für Auto	1083692
Gleichstromnetzkabel für Flugzeug	1083693
Luftbefeuchtertasche	1083699
Anschlusschlauch für Luftbefeuchter	1039642

MediCur®

MediCur AG
Mellingerstrasse 12
5443 Niederrohrdorf
Tel. 056 493 33 33
Fax 056 493 37 69
info@medicur.ch
www.medicur.ch



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen und/oder den Vertrieb eines Produktes jederzeit ohne Vorankündigung oder daraus entstehende Verpflichtungen einzustellen und haftet nicht für Folgen, die aus der Verwendung dieser Publikation entstehen.

Broudy AE 5/23/13 MCI 4105339 PN 1100147